

MGA

KALFARM®

BIEN-ÊTRE ANIMAL
ANIMAL WELFARE

Horn'up®,
una gama completa
para **descornar**
sin quemar, sin dolor.

Beceros y Cabritos

NUEVO



Horn'up®



Horn'up® S



Horn'up® C



Horn'up® XXL
beceros y cabritos

www.kalfarm.com

Las buenas prácticas del descorne

El momento adecuado

Lo más pronto posible:

Idealmente antes de 4 semanas para los becerros.

Idealmente antes de 7 días para los cabritos.

La buena contención

Inmovilizar perfectamente la cabeza para:

- asegurar una buena cauterización
- impedir quemaduras y patadas
- ahorrar tiempo

La buena técnica

• Cortar las afueras del núcleo córneo antes de realizar la cauterización para:

- bien visualizarle,
- evitar poner pelos en la potencial herida fuente de infección
- **bien visualizar la cualidad de la cauterización**

• Surco de 4-5 mm de profundidad

• No cauterice más allá de 10 segundos

- No pulse demasiado fuerte
- No arranque el núcleo corneo
- **Poner un antiséptico**

- Poner un tratamiento para las moscas en verano



El buen gestión del dolor

• Hacer **quietamiento** (por el ganadero) o **anestesia local** (por el veterinario) para asegurar la comodidad del animal y del operador.

• Utilizar un **antiinflamatorio de efecto prolongado** para limitar las consecuencias nefastas del descorne, rechazo del cornadizas, pérdida de apetito, aislamiento.

www.acteur-du-bien-etre-animal.fr

Cabe señalar

- Durante el quietamiento, la recuperación del animal es más larga que con una anestesia local y pide una puesta en dieta preliminar (2h antes al mínimo)
- Descornar únicamente animales de buena salud
- Evitar asociar el descorne con un tratamiento preventivo (vacunación ...) a un cambio de régimen alimentario

• Comodidad
Trabajando

• Ahorro
de tiempo

• Mejor
recuperación
del becerro

• Mejor GMQ

conectado
a la red

Descornar sin quemar, sin dolor

- Calienta y enfría instantáneamente
- Duración del ciclo controlada
- Muy fácil de utilizar



NUEVO

Horn'up® XXL

beceros

Cabeza cerámica
19 mm de diámetro

Horn'up® XXL

cabritos

Cabeza cerámica
16 mm de diámetro

CE

Garantizado
2
años

Descornar sin quemar, sin dolor

- Muy fácil de utilizar
- Cauterizar sin arrancar
- Tiempo controlado
- 700°C instantaneamente
- Utilización incluso en periodo de mucho frío

Horn'up®

Las ventajas del Horn'up® :

- La Autonomía más grande
80 becerros
- 7 segundos por cauterización

Horn'up® S **NUEVO**

Las ventajas del Horn'up® S:

- Autonomía 20 becerros
- 10 segundos por cauterización



batería



Horn'up® C **NUEVO**

Las ventajas del Horn'up® C :

- Autonomía 100 cabritos
- 8 segundos por cauterización

CE



www.kalfarm.com

C.B.H.F INDUSTRIE - Tél +33 (0)5 49 30 43 05 - contact@kalfarm.com